

Аппарат для электротерапии и электростимуляции Ibramed Neurodyn Esthetic

Электротерапия



Ваша цена

Розница Оптовая цена **102 085 руб.** 96 981 руб.



Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

- Количество каналов: 6
- Виды электротерапии: Амплипульстерапия («Австралийские токи»), Терапия микротоками (PMES и MENS), Терапия поляризованными токами (электрофорез, гальванизация), Ультрафонотерапия

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Аппарат для электротерапии и электростимуляции Ibramed Neurodyn Esthetic

Ibramed Neurodyn Esthetic — это аппарат для электротерапии и электростимуляции предназначенный в первую очередь для эстетической медицины. Также его можно применять в физиотерапии. Принцип работы аппарата состоит в воздействии определённой длительности импульсами тока разной частоты и силы.

Ibramed Neurodyn Esthetic — это шестиканальный прибор, с четырьмя каналами для стандартной электротерапии, одним каналом для аура-массажа и одним каналом для ультратонотерапии (высокочастотной терапии с использованием стеклянных электродов). Его используют для проведения ультратонотерапии, ионофореза (электрофореза), терапии микротоками, а также синусоидальными («австралийскими») токами в непрерывном и импульсном режиме.

Виды доступной электротерапи

- Амплипульстерапия («Австралийские токи»)
- Амплитуда импульсов:0-140 мА (от пика к пику).
- Форма волны: синусоидальная модулирующая.
- Несущая частота: 1 или 4 кГц, частота 1-120 Гц.
- Рабочий цикл 10-50 %.
- Терапия микротоками (PMES и MENS)
- Амплитуда импульсов: 0-990 мА (от пика к пику).
- Форма волны: половинно-ректификационная синусоидальная.
- Несущая частота: 15 кГц, частота 0,1-500 Гц.
- Полярность: положительная, отрицательная, переменная.
- Поляризация
- Амплитуда импульсов:0-30 мА (от пика к пику).
- Форма волны: половинно-ректификационная синусоидальная.
- Полярность: положительная, отрицательная, переменная.
- Несущая частота: 15 кГц.
- Аура-массаж
- Частота: 10-200 Гц.
- Интенсивность: 0-100 %.



- Ультрафонотерапия
- Интенсивность: 0-100%.

Режимы терапии

«Австралийский ток»

«Австралийский ток» — это синусоидальный импульсный ток частотой 1000 Гц или 4000 Гц, длительностью 2-4 мс, моделированный последовательностью импульсов переменной частоты 1-120 Гц. Импульсация переменной частоты позволяет с одной стороны избежать быстрой адаптации возбудимой ткани к воздействию, с другой стороны — более мягкому восприятию ощущений пациента в зоне воздействия.

Модуляция и форма волны «австралийского тока» комфортнее для большинства пациентов чем СМТ («русский ток») и функциональная электростимуляция (ФЭС). Эффективность моторного возбуждения мышц и, соответственно, возникающих вследствие этого эффектов, выше, чем при применении интерференционных токов и ЧЭНС.

Поляризованный ток

Электрический ток силой от 1 до 30 мА и с постоянной полярностью используется для проведения электрофореза (ионтофореза) и изолированного гальванического воздействия.

Микротоки (PMES и MENS)

Электрический ток силой от 10 до 990 мкА. Ток постоянной полярности называется PMES. Ток переменной полярности (автоматическая инверсия полярности каждые 3 секунды) прямоугольными импульсами, моделированный низкой частотой от 1 до 500 Гц — MENS.

Ультратонотерапия

Ультратонотерапия — переменный ток высокой частоты (22 кГц) высокого напряжения (5 кВ) и небольшой мощности (10 Вт), который подводится к ткани локально через газоразрядный электрод. Электрод выполнен в виде стеклянной трубочки с впаянным металлическим стержнем и заполнен инертным газом (неоном) под давлением 13-15 ГПА. Действующим фактором является тихий короткий электрический разряд, возникающий между электродом и участком тела. В комплект входят шесть стеклянных электродов: пять для различных частей головы и шеи, а также электрод для непрямой терапии (его нужно держать в руках).

Методика ультратонотерапии во многом схожа с дарсонвализацией, однако обладает гораздо меньшим раздражающим действием на тело пациента. Широко используется в педиатрической практике ввиду безболезненности (в отличии от дарсонвализации).

Аура-массаж

Это техника лёгкого вибрационного массажа, при которой один электрод держит в руках пациентка, а другой клеится на кожу косметолога. Такой массаж применяется для расслабления мышц, облегчения боли после пластической хирургии, улучшение лимфодренажа, улучшения контуров тела.

Комплектация Ibramed Neurodyn Esthetic

- Сам прибор Ibramed Neurodyn Esthetic с кабелем питания.
- Контактный гель 100 мл. 1 шт.
- Кабель пациента (1500 мм разъём типа «банан» 2 мм) 4 шт.
- Зажим типа «крокодил» под разъём типа «банан» 2 мм $\stackrel{\cdot}{-}$ 4 шт.
- Электрод силиконовый 30×50 мм 8 шт.
- Кабель пациента (1500 мм разъём типа «банан» 2мм) 1 канал для применения эстетических ручек-электродов 1 шт.
- Насадки для электролифтинга 2 шт.
- ullet Ручка-электрод эстетическая для проведения электротерапии по лицу 1 шт.
- ullet Наконечник сферический для эстетической ручки-электрода -1шт.
- ullet Насадка-крюк для эстетической ручки-электрода $1\, {
 m mt}$.
- Наконечник роликовый для эстетической ручки-электрода 1 шт.
- \bullet Ручка-электрод эстетическая для проведения электротерапии по телу (разъём «банан» 2 мм) 2 шт.



- Ручка-электрод эстетическая для проведения электротерапии по телу (разъём «банан» 2 мм) 2 шт.
- Фиксатор эластичный для крепления электродов 2 шт.
- Электрод (дисперсионный) алюминиевый 75×40 мм с токопроводящей прокладкой -8 + 8 шт.
- Электроды лицевые 3×9x5×15 2шт и 3×9x5×10 2 шт.
- Контейнер сборник для аксессуаров Neurodyn Esthetic 1 шт.
- ullet Набор стеклянных электродов для ультратонотерапии 1 набор из 6 электродов.
- Предохранитель запасной 1 шт.

Преимущества

- Большое количество аксессуаров позволяет проводить все виды эстетической электротерапии, включая иглоукалывание и электрофорез.
- Вся информация о параметрах, отсчете времени процедуры и текущей фазе цикла, заданных специалистом, отображается на жидкокристаллическом дисплее.
- Режим лечения можно устанавливать вручную (выбирая метод терапии, режим и время процедуры) или можно выбрать один из 19 предустановленных протоколов лечения. Если в клинике часто используются собственные протоколы, то их можно внести в память прибора (встроенная память рассчитана на сохранение до 10 пользовательских программ).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	IBRAMED
Страна бренда	Бразилия
Отрасли	Эстетическая медицина
Количество каналов	6
Виды электротерапии	
	Амплипульстерапия («Австралийские токи»),
	Терапия микротоками (PMES и MENS) , Терапия
	Терапия микротоками (PMES и MENS) , Терапия поляризованными токами (электрофорез,
Габариты, мм	поляризованными токами (электрофорез,
Габариты, мм Вес, кг	поляризованными токами (электрофорез, гальванизация), Ультрафонотерапия
•	поляризованными токами (электрофорез, гальванизация) , Ультрафонотерапия 360×315×125

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем



информацию по мере получения её от производителей.