

## Аппарат УВЧ-терапии Мед ТеКо УВЧ-80

УВЧ и коротковолновая терапия



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Аппарат УВЧ-терапии Мед ТеКо УВЧ-80

Мед ТеКо УВЧ-80 – аппарат для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты. Используется для физиотерапевтического лечения различных заболеваний с помощью УВЧ-терапии.

Устройство отличается современной элементной базой и автоматической настройкой резонанса, что обеспечивает стабильность и эффективность процедур. Гибкие электродержатели, совмещённые с проводящими фидерами, упрощают процесс позиционирования и позволяют равномерно воздействовать на зоны лечения. Аппарат обладает современным дизайном и сравнительно малыми размерами и весом, что делает его удобным для использования в разных медицинских условиях.

Мед ТеКо УВЧ-80 применяется для лечения широкого спектра заболеваний, включая воспалительные процессы, травмы и нарушения в работе различных систем организма, обеспечивая комплексный лечебный эффект.

### Особенности

- Современная элементная база
- Автоматическая настройка резонанса
- Гибкие электродержатели, совмещённые с проводящими фидерами
- Современный дизайн
- Сравнительно малый вес и габариты аппарата

### Показания к применению

- Острые воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки в стадии инфильтрации (фурункул, панариции, ожоги)
- Воспалительные заболевания лёгких
- Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта
- Заболевания мочеполовых органов
- Травмы и заболевания костно-мышечной системы
- Травмы и заболевания периферической нервной системы
- Заболевания ЛОР-органов
- Вегето-сосудистые дисфункции, гипертоническая болезнь I–II стадии
- Климактерический и постклимактерический синдромы
- Стоматологические проблемы (альвеолит, гингивит, пародонтит, травмы)

### Противопоказания

- Гипотензия
- Ишемическая болезнь сердца (стенокардия напряжения  $\times\times\times$  ФК)
- Оформленный гнойный очаг воспаления любой локализации при отсутствии дренирования
- Наличие электрокардиостимулятора
- Острые нарушения мозгового кровообращения
- Беременность
- Наличие металлических предметов размерами не менее 20 × 20 мм в зоне воздействия, расположенных вблизи крупных кровеносных сосудов и нервных стволов
- Туберкулез
- Онкологические заболевания

- Заболевания крови, закупорка вен

## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Номинальное сопротивление нагрузки, Ом	50
Оптимальный зазор электродов, мм	20
Время выхода аппарата на рабочий режим, с	30
Время работы в повторно-кратковременном режиме, ч	6
Время работы, мин	20
Время паузы, мин	10
Диапазон установки таймера, мин	(0...99) ± 5 %
Рабочая частота аппарата, МГц	27,12 ± 0,163
Выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт ± 20 %	(10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80)

## Преимущества

Аппарат УВЧ-терапии Мед ТеКо УВЧ-80 обладает рядом преимуществ, которые делают его эффективным и удобным средством для физиотерапевтического лечения:

- Современная элементная база — обеспечивает стабильную и надёжную работу устройства.
- Автоматическая настройка резонанса — упрощает эксплуатацию и повышает точность лечебного воздействия.
- Гибкие электродержатели с проводящими фидерами — гарантируют комфортное и точное размещение электродов на теле пациента.
- Компактные размеры и небольшой вес — облегчают транспортировку и использование в различных медицинских условиях.
- Регулируемая выходная мощность с несколькими ступенями — позволяет индивидуально настраивать интенсивность лечения.
- Широкий диапазон таймера с точной регулировкой — обеспечивает контроль времени процедур.
- Высокая рабочая частота — обеспечивает эффективное воздействие на ткани и ускоряет процессы регенерации.
- Эргономичный и современный дизайн — повышает удобство работы медицинского персонала.
- Наличие функции автоматического выхода на рабочий режим — сокращает время подготовки к процедуре.
- Широкий спектр показаний к применению — универсальность аппарата для различных терапевтических задач.

Мед ТеКо УВЧ-80 является эффективным и надёжным решением для применения в физиотерапии, обеспечивая качественное лечение и комфорт пациентов.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Мед ТеКо
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Реабилитация
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010022729.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010022729.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	421 x 285 x 170
<b>Вес, кг</b>	0
<b>Вес в упаковке, кг</b>	520

<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	50
<b>Страна производства</b>	Россия

#### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.