

## Иммобилизационный вакуумный матрас Медтехника МИВ-3 для детей и подростков

Медицинские носилки

Ваша цена

Розница

35 700 руб.

Оптовая цена

35 100 руб.

Сделано  
в России

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение



НДС не облагается

### Описание

#### Иммобилизационный вакуумный матрас Медтехника МИВ-3 для детей и подростков

Иммобилизационный вакуумный матрас Медтехника МИВ-3 предназначен для безопасной иммобилизации и транспортировки детей и подростков при травмах позвоночника, костей таза, верхних и нижних конечностей. Изделие обеспечивает надёжную фиксацию тела пострадавшего, снижая риск дополнительных повреждений во время транспортировки.

Матрас изготовлен из водоотталкивающей винилуретанискожи, а внутренняя камера выполнена из ПВХ-плёнки и заполнена синтетическими гранулами размером 3–5 мм. После откачки воздуха ручным насосом матрас принимает анатомическую форму тела пациента и затвердевает, обеспечивая физиологичную иммобилизацию.

Конструкция оснащена двумя фиксирующими ремнями с фастексными застёжками, восемью удобными ручками для переноски и цветовой маркировкой сторон. Матрас является рентгенопрозрачным, благодаря чему проведение рентгенографии возможно без нарушения фиксации пострадавшего. В сложенном состоянии изделие компактно размещается в транспортной сумке с ручками.

#### Особенности

- Предназначен для детей и подростков.
- Бескаркасная складная конструкция.
- Иммобилизация позвоночника, таза, верхних и нижних конечностей.
- Внешнее покрытие из водоотталкивающей винилуретанискожи.
- Внутренняя камера изготовлена из ПВХ-плёнки.
- Наполнитель из синтетических гранул размером 3–5 мм.
- После вакуумирования принимает форму тела пациента и надёжно фиксирует его.
- Сохраняет форму без дополнительной откачки воздуха до 10 часов.
- Рентгенопрозрачная конструкция позволяет выполнять рентгенографию без снятия матраса.
- Оснащён двумя фиксирующими ремнями из ранцевой ленты с фастексными застёжками.
- Длина каждого фиксирующего ремня — 1 500 мм.
- По периметру предусмотрены 4 пары удобных ручек для переноски.
- Цветовая маркировка сторон: синяя — наружная, оранжевая — внутренняя.
- Компактно складывается в транспортную сумку.
- Ручной насос входит в комплект поставки.

#### Показания к применению

- Травмы позвоночника.
- Травмы костей таза.
- Травмы верхних конечностей.
- Травмы нижних конечностей.
- Иммобилизация и транспортировка пострадавших детей и подростков.
- Использование в службах скорой и неотложной медицинской помощи.
- Применение в службах медицины катастроф.
- Использование подразделениями МО и МВД.
- Применение формированиями МЧС и гражданской обороны.
- Использование на крупных производственных и добывающих предприятиях.
- Применение в спортивных обществах и спортивных комплексах.

## Порядок использования

1. Разложить матрас на максимально ровной поверхности.
2. Уложить пострадавшего на матрас.
3. Завернуть боковые части матраса вокруг тела пациента.
4. Зафиксировать положение двумя ремнями.
5. Подключить ручной насос к клапану.
6. Откачать воздух до полного затвердевания матраса.

## Технические характеристики

| Характеристика                                    | Значение                              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип конструкции                                   | бескаркасный                          |
| Исполнение                                        | складной                              |
| Назначение                                        | для детей и подростков                |
| Материал наружного покрытия                       | винилуретанискожа                     |
| Материал внутренней камеры                        | ПВХ-плёнка                            |
| Наполнитель                                       | синтетические гранулы размером 3–5 мм |
| Рентгенопрозрачность                              | да                                    |
| Количество фиксирующих ремней                     | 2 шт.                                 |
| Длина фиксирующего ремня                          | 1 500 мм                              |
| Количество ручек для переноски                    | 4 пары                                |
| Максимальная нагрузка                             | 150 кг                                |
| Время сохранения формы без дополнительной откачки | до 10 часов                           |
| Насос                                             | ручной, входит в комплект             |
| Гарантия производителя                            | 12 месяцев                            |

## Комплект поставки

- Иммобилизационный вакуумный матрас Медтехника МИВ-3 — 1 шт.
- Ручной насос — 1 шт.
- Транспортная сумка — 1 шт.
- Фиксирующие ремни — 2 шт.
- Ремкомплект — 1 шт.
- Паспорт изделия.

## Преимущества

- Надёжная иммобилизация детей и подростков при травмах позвоночника, таза и конечностей.
- Вакуумная технология обеспечивает точное повторение анатомической формы тела пациента.
- Физиологичная фиксация снижает риск дополнительных повреждений во время транспортировки.
- Рентгенопрозрачная конструкция позволяет проводить рентгенографию без снятия матраса.
- Внутренний наполнитель из синтетических гранул размером 3–5 мм обеспечивает плотное прилегание к телу.
- Сохраняет форму и надёжную фиксацию до 10 часов без дополнительной откачки воздуха.
- Внешнее покрытие из водоотталкивающей винилуретанискожи устойчиво к воздействию влаги и легко очищается.
- Бескаркасная складная конструкция удобна для хранения и транспортировки.
- Восемь ручек (4 пары) обеспечивают удобную переноску пострадавшего несколькими спасателями.
- Два фиксирующих ремня с фастексными застёжками позволяют быстро и надёжно закрепить пациента.
- Цветовая маркировка сторон облегчает правильную укладку пострадавшего.
- Ручной насос входит в стандартный комплект поставки.
- Компактно складывается и размещается в транспортной сумке с ручками.
- Подходит для эксплуатации в службах скорой помощи, медицине катастроф, МЧС, подразделениях МО и МВД, а также на спортивных и производственных объектах.
- Максимальная допустимая нагрузка составляет 150 кг.
- Изготовлен в России.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд               | Сделано в России                                                                                              |
| Страна бренда       | Россия                                                                                                        |
| Отрасли             | Для кабинета педиатра                                                                                         |
| Ссылка на документы | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005112.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005112.pdf</a> |
| Габариты, мм        | 1500×800                                                                                                      |
| Вес, кг             | 4.5                                                                                                           |
| Страна производства | Россия                                                                                                        |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.