

## Приставка ВАЦ-01-ТРИМА для аппарата Трима АМУС-01-ИНТРАМАГ

Магнитотерапия

trima®

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение



### Описание

#### Приставка ВАЦ-01-ТРИМА для аппарата Трима АМУС-01-ИНТРАМАГ

Приставка ВАЦ-01-ТРИМА предназначена для проведения виброаспирации цервикального канала при лечении хронических эндоцервицитов в составе аппарата Трима АМУС-01-ИНТРАМАГ (женский вариант). Устройство применяется в гинекологической практике как элемент комплексной физиотерапии с использованием вибромассажа, вакуум-аспирации и электрофореза лекарственных препаратов.

Методика лечения основана на поочерёдном выполнении вибромассажа и вакуум-аспирации эндоцервикса с инстилляцией стерильного дезинфицирующего раствора, после чего проводится электрофорез лекарственного препарата на фоне этиотропной и иммуностимулирующей терапии. Такой подход способствует более эффективной санации цервикального канала и повышению эффективности лечения.

Конструкция приставки включает электронный блок, пистолет вибратор-аспиратор со съёмной рабочей частью и набор цервикальных наконечников различного диаметра. Электронный блок содержит компрессор для создания отрицательного давления и блок электрофореза. Специальная конструкция пистолета обеспечивает удаление аспирата без контакта патологического содержимого со слизистой влагалища, снижая риск дополнительного инфицирования.

Вибро- и вакуум-массаж способствуют раскрытию резервных капилляров, улучшению микроциркуляции и лимфодренажа, уменьшению венолимфостаза, улучшению трофики тканей и стимуляции регенеративных процессов в области шейки матки.

#### Принцип лечения

- Вибромассаж цервикального канала.
- Вакуум-аспирация эндоцервикса.
- Инстиляция стерильного дезинфицирующего раствора (3 % раствора перекиси водорода).
- Эндоцервикальный электрофорез лекарственного препарата.
- Проведение процедур в сочетании с этиотропной и иммуностимулирующей терапией.

#### Особенности

- Предназначена для работы совместно с аппаратом Трима АМУС-01-ИНТРАМАГ.
- Сочетает вибромассаж, вакуум-аспирацию и электрофорез лекарственных препаратов.
- Способствует санации крипт и дренированию кистоподобных микрополостей эндоцервикса.
- Повышает выявляемость патогенной микрофлоры при хронических инфекциях.
- Улучшает микроциркуляцию, лимфодренаж и трофику тканей.
- Способствует уменьшению венолимфостаза и стимуляции регенеративных процессов.
- Электронный блок объединяет компрессор и блок электрофореза.
- Съёмная рабочая часть пистолета облегчает стерилизацию.
- Конструкция предотвращает загрязнение слизистой влагалища аспиратом при удалении патологического содержимого.
- Предусмотрено использование гибких катетеров-ирригаторов для проведения электрофореза.

#### Показания к применению

- Хронический эндоцервицит.
- Подготовка к радиоволновой терапии доброкачественных заболеваний шейки матки.

## Противопоказания

- Острый кольпит.
- Острый цервицит.
- Эндомиометрит.
- Сальпингит.
- Сальпингоофорит.
- Уретрит.
- Цистит.
- Беременность.
- Менструация.
- Метроррагия.
- Опухоли мочеполовой системы.
- Системные заболевания крови.
- Токсические состояния.
- Индивидуальная непереносимость вводимых лекарственных растворов.

## Комплект поставки

- Электронный блок устройства-приставки ВАЦ-01-ТРИМА – 1 шт.
- Пистолет вибратор-аспиратор с соединительной трубкой и наконечником Ø 5 мм – 1 шт.
- Цервикальный наконечник Ø 3 мм – 1 шт.
- Цервикальные наконечники Ø 4 мм – 3 шт.
- Цервикальные наконечники Ø 5 мм – 5 шт.
- Цервикальный наконечник Ø 6 мм – 1 шт.
- Соединительные трубки Ø 8 мм – 10 шт.
- Набор цервикальных катетеров-ирригаторов с активным электродом для электрофореза – 5 шт.
- Пассивный электрод для электрофореза – 1 шт.
- Кабель активного электрода – 1 шт.
- Кабель пассивного электрода – 1 шт.
- Ёмкость для сбора аспирата объёмом 0,5 л – 1 шт.
- Набор катетеров для орошения цервикального канала перед виброаспирацией – 5 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Амплитуда вибрации цервикального наконечника	от 0,05 до 0,4 мм
Режимы вибрации	Непрерывный и модулированный
Частота модуляции	от 1 до 10 Гц
Частота вибрации наконечника	50 или 100 Гц
Время процедуры	от 1 до 15 мин
Разрежение в накопительной ёмкости	до 0,5 кгс/см <sup>2</sup>
Скорость откачки жидкости	от 0,1 до 0,7 л/мин
Регулировка тока электрофореза	от 0,5 до 5 мА
Средний срок службы	не менее 5 лет
Безопасность	Соответствует ГОСТ Р 50267.0-92
Климатическое исполнение	УХЛ категории 4.2

## Преимущества

- Предназначена для комплексного лечения хронического эндоцервицита в составе аппарата Трима АМУС-01-ИНТРАМАГ.
- Объединяет вибромассаж, вакуум-аспирацию и лекарственный электрофорез в едином лечебном комплексе.
- Обеспечивает эффективную санацию цервикального канала и дренирование труднодоступных микрополостей эндоцервикса.
- Способствует повышению выявляемости патогенной микрофлоры, что позволяет повысить эффективность последующего лечения.
- Улучшает микроциркуляцию, лимфодренаж и трофику тканей шейки матки.
- Стимулирует регенеративные процессы благодаря сочетанию вибрационного и вакуумного воздействия.
- Компрессор обеспечивает стабильное создание отрицательного давления для проведения вакуум-аспирации.
- Встроенный блок электрофореза позволяет вводить лекарственные препараты непосредственно в цервикальный канал.
- Специальная конструкция пистолета предотвращает контакт аспирата со слизистой влагалища при его удалении.
- Съёмная рабочая часть пистолета облегчает проведение стерилизации и санитарной обработки.
- Наличие набора цервикальных наконечников различных диаметров позволяет подобрать

оптимальный вариант для каждой процедуры.

- Поддерживает непрерывный и модулированный режимы вибрации.
- Регулируемые параметры вибрации и электрофореза позволяют адаптировать процедуру к клинической ситуации.
- Комплектуется катетерами-ирригаторами и электродами для проведения полного курса лечения.
- Соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0–92 по безопасности медицинской техники.
- Рассчитана на срок службы не менее 5 лет.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Трима
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета гинеколога
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040058.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040058.pdf</a>
Габариты, мм	224×199×130
Вес, кг	1.8
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.